

パルミックアプリ クイックマニュアル

1. パルミック本体と iPad、iPhone の接続


① 初めて接続する場合は本体のペアリング情報を消去します。(接続する端末：iPad、iPhone 等を変更した時も消去が必要になります。) 測定状態で電源スイッチを 5 秒間の長押しで消去完了



② iPad にてパルミックアプリのアイコンにタップしアプリを起動します。



③ 起動したメイン画面の設定ボタンにタップし設定メニュー画面へ。

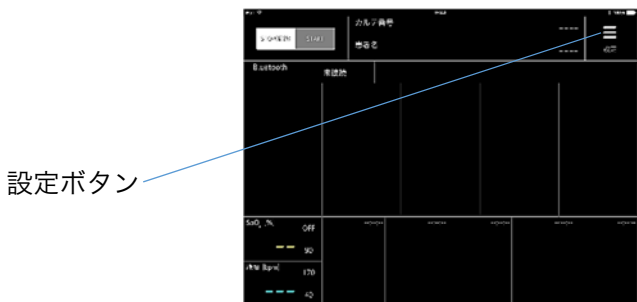

④ 無線接続画面で開始ボタンを押し Palmic の検索を行います。



⑤ Palmic MIC-1~と表示されるのでタップします。

タップ



⑥ ペアリング要求の「ペアリング」をタップします。

ペアリング



⑦ 「戻る」にタップしメイン画面へ戻ります。


戻る



接続すると接続解除バーが表示されます。

⑧ 測定中、接続が切断し未接続の表示が出た場合は再度、無線接続画面で接続します。

接続状態
(接続中)

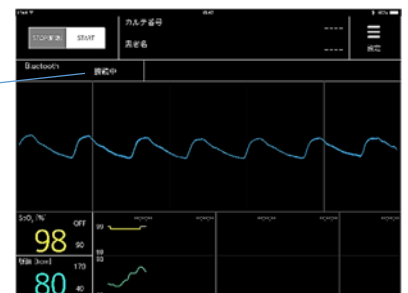

※ 一度ペアリングを行うと次回起動時より自動接続します。

2. WithCare（患者情報管理ソフト）に記録

WithCare を使用する場合は最初に、WithCare ログイン情報の設定を行います。

① 設定メニューの「WithCare ログイン」をタップして入力画面へ。

WithCare ログイン



② WithCare 登録の ID、パスワード、カルテ番号を入力します。

ID

パスワード

カルテ番号



③ ID とパスワードの保存は□にタップしチェックを入れます。(次回以降の ID とパスワードの入力を省略できます。)

保存チェック

ログインボタン




④ ログインボタンをタップし、ログイン成功なら、「戻る」をタップしてメイン画面へ。

⑤ 患者変更時はカルテ番号を入力して再度ログインを行います。

⑥ カルテ番号と患者名が表示されます。

患者名 カルテ番号

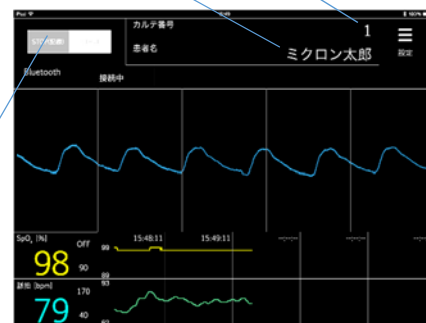

STOP（記録）ボタン


⑦ 測定中に「STOP（記録）」にタップすると「WithCare」に測定データが送信されます。

⑧ WithCare 画面

記録されるデータは停止ボタンを押した時の計測値。
脈拍データ：平均値、最大、最小値

SpO₂ 値

「検査情報の取得」をタップすると計測値が表示されます。

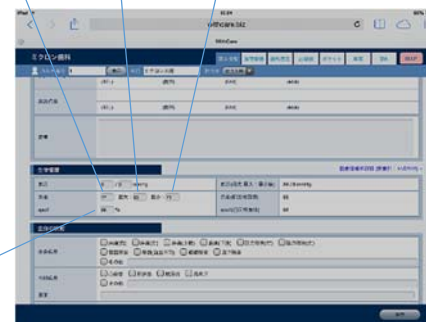

3. 監視値はずれ通知

初期設定の監視値は患者の状態にあわせて変更することができます。

① 監視値設定変更方法


(1) 設定の監視値設定にタップし監視値画面へ



(2) 上限値と下限値をスライドで設定します。


② 測定値が設定の範囲から外れると数値が赤く点滅し通知音が発生します。

赤く点滅した数値にタップすると音のみ解除されますが、点滅状態が2分続くと再び音が発生します。

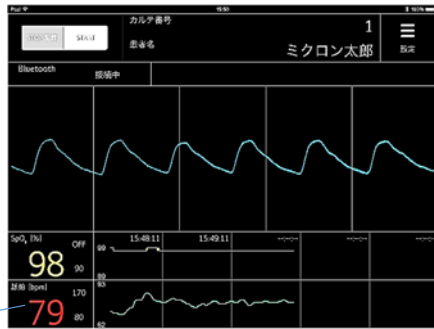

赤色点滅
(タップすると消音)

③ パルミック本体のエラーは赤く表示されます。

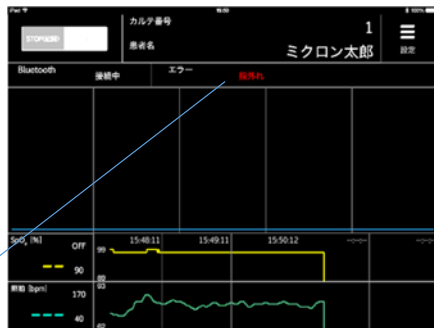

エラー表示
(指外れ / 脈拍検出不可 / センサ未接続)

4. 各画面説明

① メイン画面


測定 STOP(記録)/START 設定メニュー

無線接続状態

脈波形

SpO₂値

脈拍値

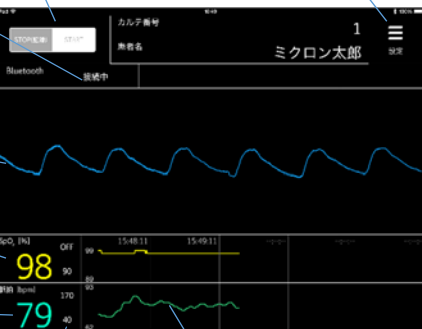


監視値

測定履歴

② 無線接続画面

Palmic 検索開始

無線接続

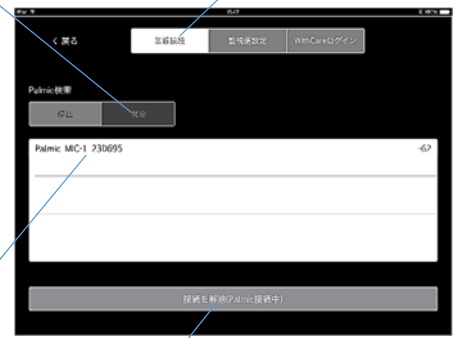

接続対象 Palmic 表示


接続解除ボタン

(接続時に表示されます。)

③ 監視値設定画面

SpO₂ 上限値

脈拍数上限値

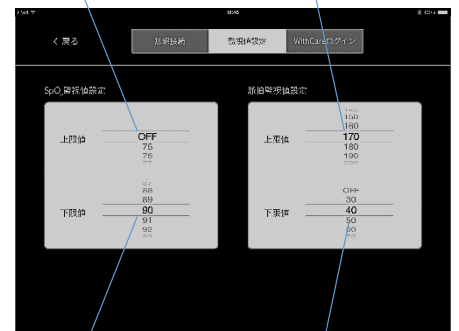

SpO₂ 下限値

脈拍数下限値

④ WithCare ログイン画面

ID 入力


パスワード入力

カルテ番号入力

ID/パスワード

保存チェック欄

ログインボタン

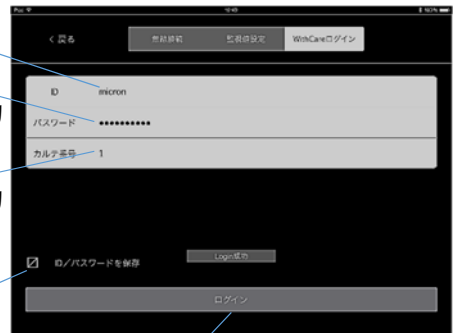

5. 仕様について

仕 様	
販 売 名	パルミックアプリ
類 別	プログラム01 疾病診断用プログラム
一 般 的 名 称	パルスオキシメータ用プログラム
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
医 療 機 器 認 証 番 号	227AKBZX00045000
製 造 販 売 業 者	株式会社ミクロン 住所：東京都大田区池上 2-17-7